



Vacumed

Vorteile

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Automatische vor eingestellte Behandlungsprogramme u.a. für verschiedene Indikationen
- Elektrisch verstellbarer Winkel der Rückenauflage für optimale Beugestellung (Standardausführung)
- Made in Germany

Vacumed

Intermittierende Vakuum Therapie (IVT) für die untere Körperhälfte

Technische Daten

- Maße (L/B/H): 220/110/120 cm
- Gesamtgewicht: 150 kg
- Nutzergewicht: bis 180 kg

Ausstattung

- Medizinprodukt Klasse IIa
- Elektrische Neigungsverstellung des Innenteils der Liegefläche zur optimalen Hüftbeugestellung
- 16 vorinstallierte Programme

trainingsProgramme

- P1 Venen-Programm plus/40 Min
- P2 Venen-Programm/30 Min
- P3 pAVK-Programm/30 Min
- P4 Gefäßtraining plus/30 Min
- P5 Gefäßtraining 30/30 Min
- P6 Gefäßtraining 40/40 Min
- P7 Diabetes-Programm/40 Min
- P8 Ödem-Programm/40 Min

- P9 Lymph-Programm Sport/30 Min
- P10 Regenerations-Programm/30 Min
- P11 Athletik-Programm/30 Min
- P12 Sport-Programm/30 Min
- P13 Reha-Programm 30/30 Min
- P14 Reha-Programm 45/45 Min
- P15 Wundheilungs-Programm/30 Min
- P16 Traktions-Programm/30 Min

Indikationen

- pAVK
- diabetischer Mikroangiopathie
- CVI
- Rehabilitationsbeschleunigung
- primärer Prävention

Gefäßtraining

- Rückbildung von Ödemen

Kontraindikationen

- Thrombophlebitis oder akuten Thrombosen bis 8 Wochen
- Instabile Angina Pectoris
- Leisten- oder Bauchwandbruch sowie bei Dauerkatheter (z.B. PCD)
- Schwangerschaft

Bei künstlichem Darmausgang ist darauf zu achten, dass die Linse unterhalb des Stomas platziert ist. Bei extremen Bluthochdruck soll die Behandlung nur unter Beobachtung und Aufsicht durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.